


MONTERINGSANVISNING

1. Lossa låsremmen (1).
2. Placera ryggstödet under madrassen.
3. Sängryggstödet måste, innan det tas i bruk, låsas fast mot sängbotten med de fyra sidolåsningarna som sitter på undre ramen (3) och med spännremmarna (4).
4. Kabeln mellan manöverdosan och styrenheten (5) måste placeras så att ingen klämrisk föreligger.
5. Anslut stickproppen till vägguttag 230V AC
6. Ryggstödet är nu klart för att användas.

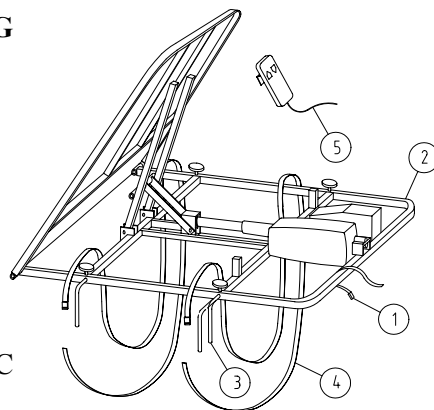

CE