

Sängryggstöd SR 100/101



Tillverkare:

Sterners Specialfabrik AB
780 51 Dala-Järna
Tel: 0281-59 44 40
Fax: 0281-205 31
E-Mail: info @ sterners.se
www.sterners.se

Funktion

SR 100 är ett hjälpmedel vid förflyttning i och ur säng samt vid lägesförändringar.
Manövreras med lätttryckt handkontroll med väl synliga pilar för upp och ned.
På handkontrollen finns fäste för upphängning.

Rengöring

Skivan torkas av med fuktad trasa
Underrede dammsugas och torkas av med fuktad trasa

Underhåll

Ramarnas lagring är infettade från fabrik och behöver normalt ej smörjas
Den yta som kolvstångens platta glider på smörjes efter ca 5000 körningar eller en gång per år
Som smörjmedel används några droppar symaskinsolja

Material

Ryggskiva av strukturerad ABS-plast
Underrede av vitlackerade stålrör
Storlek 780 x 780 / 1050 x 780 mm
Vikt ca 14 kg. Motor 24 V
Lyfthastighet till maximalt läge ca 20 sek.

Demontering / skrotning


Produkten är återvinningsbar till 100 %.

- Ryggskiva av plast demonteras och återvinnes som hårdplast
- Elmotor och övrigt elmaterial återvinnes som elektronikskrot
- Resterande material återvinnes som metallskrot

SR 100 får inte användas för något annat ändamål än vad som föreskrivs.



Reservdelsförteckning SR100-2/101-2

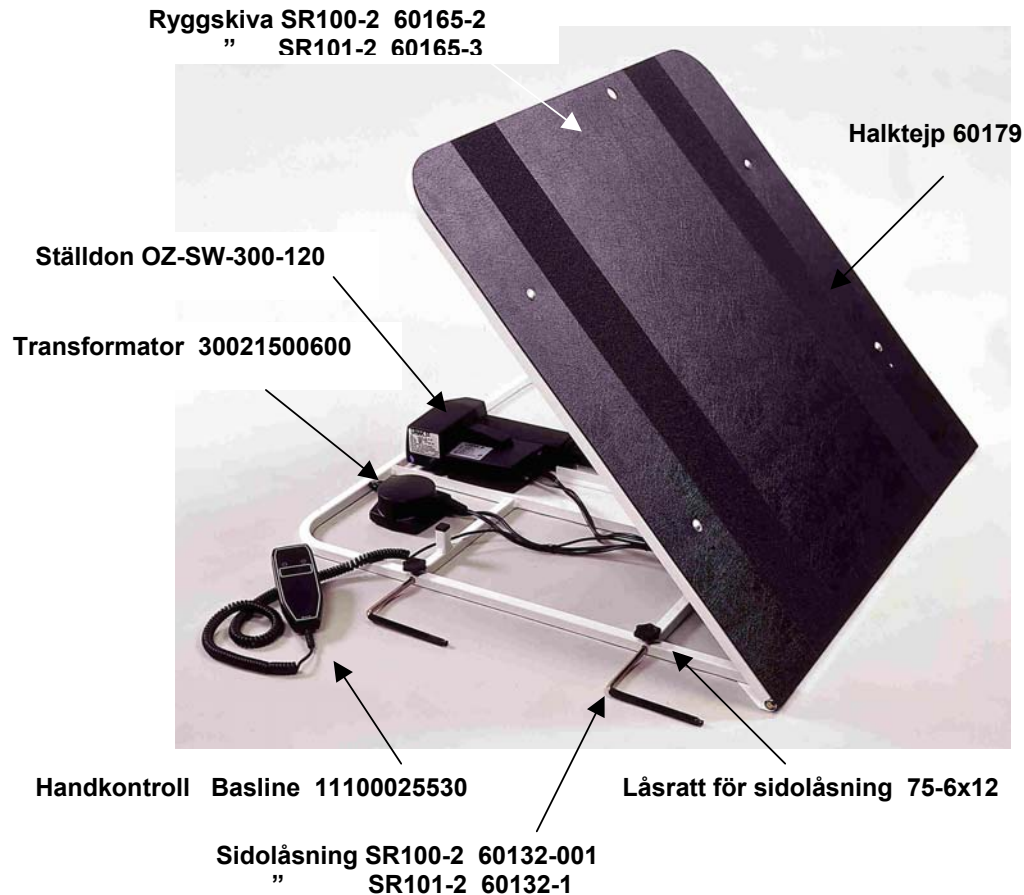

Övriga reservdelar:

Spännrem 18x3000 mm 60181

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE DIREKTIV 89-392 , 89-336

TILLVERKARE : Sterners Specialfabrik AB
Stationsvägen 12
780 51 Dala-Järna
SWEDEN

BESKRIVNING AV PRODUKT:

Sängryggstöd som hjälpmedel vid förflyttning i och ur säng
samt vid lägesförändring.

Typ: SR100-2 SR 101-2

Tillverkad enligt tillämpbara delar ur följande standarder:
SS 2093 , SS 2430 , SPRI 32103.

DEKLARATION

Jag försäkrar härmed att ovanstående produkt är tillverkad i
överensstämmelse med medlemsstaternas lagstiftning samt
direktiv 89/392.

Signatur av firmatecknare och ansvarig person:

.....