


## MONTERINGSANVISNING SR100 och SR101

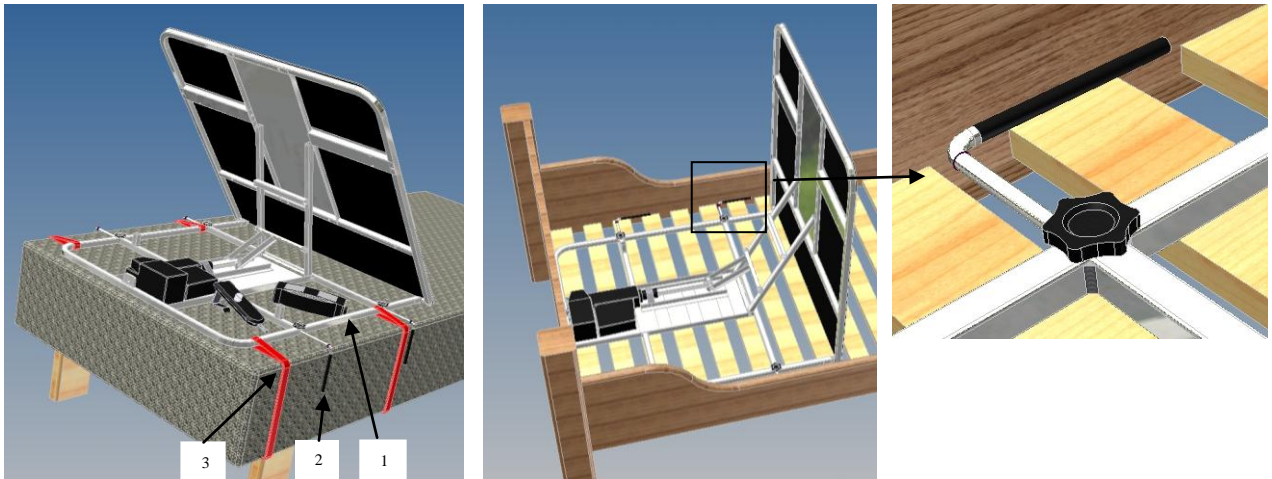

- A Lossa låsremmen som håller samman sängryggstödet.
- B Placera ryggstödet under madrassen.
- C Transformatorn (1) kan med fördel placeras på golvet.
- D Viktigt - lås fast sängryggstödet mot sängbotten med de fyra sidolåsningarna. (2)  
(*säng modell DUX utan träram*)  
Alternativet spänn sidolåsningarna mot sängramens kant (*säng modell med träbotten*)
- E Trä de långa spännremmarna (3) runt DUX dynan och dra till så att Du får en extra låsning av sängryggstödet.. För sängar med träbotten behövs inte detta.
- F Kontrollera att det inte finns någon klämrisk för anslutningskablarna.
- G Anslut stickproppen till vägguttag 230V AC

**Ryggstödet är nu klart för användning**

**CE**