

Funktion

SR 100 är ett hjälpmedel vid förflyttning i och ur säng

samt vid lägesförändringar.

Manövreras med lätttryckt handkontroll med väl synliga pilar för upp och ned.

På handkontrollen finns fäste för upphängning.

Rengöring/Underhåll

Skivan och underrede dammsuges och torkas av med fuktad trasa.

Ramarnas lagring är infettade från fabrik och behöver normalt ej smörjas

Den yta som kolvstångens platta glider på smörjes efter ca 5000 körningar eller en gång / år

Som smörjmedel används några droppar symaskinsolja.

Se alltid till att sängryggstödet sitter fast ordentligt genom att kontrollera:

att sidolåsningarna är rätt justerade och fastskruvade,

att spännremmarna inte är skadade och är rätt åtdragna.

Detta kontrolleras minst en gång / månad.

Material

Ryggskiva av strukturerad ABS-plast

Underrede av förnicklade stålrör

Storlek 780 x 780 / 1050 x 780 mm

Vikt ca 14 kg. Motor 24 V

Lyfthastighet till maximalt läge ca 20 sek.

Demontering / skrotning

Produkten är återvinningsbar till 100 %.

Ryggskiva av plast demonteras och återvinnes som hårdplast

Elmotor och övrigt elmaterial återvinnes som elektronikskrot

Resterande material återvinnes som metallskrot

SR 100/101 får inte användas för något annat ändamål än vad som föreskrivs.

Reservdelsförteckning SR100-2/101-2

Ryggskiva	SR100-2	60165-2
Ryggskiva	SR101-2	60165-3

Halktape	60179
----------	-------

Ställdon	OZ-SW-300-120
----------	---------------

Transformator	30021500600
---------------	-------------


Handkontroll	11100023530
--------------	-------------

Sidolåsning SR100-2	60132-001
Sidolåsning SR101-2	60132-1

Lås ratt för sidolåsning	75-6x12
--------------------------	---------

Övriga reservdelar

Spännrem 18x3700mm	60185
Spännrem 18x5000mm	60186

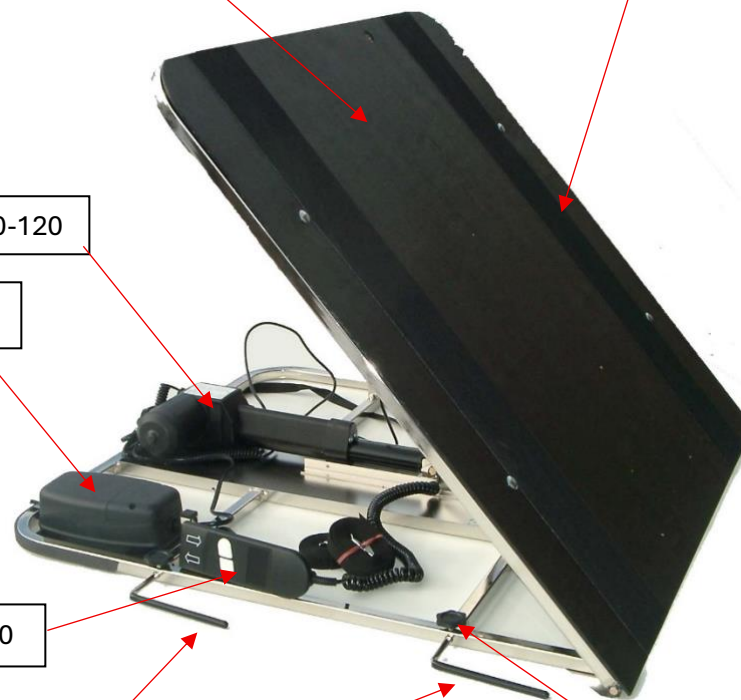

Förfarande vid återanvändande och rekonditionering

Vid återanvändande se till att underrede dammsuges och rengörs med fuktad trasa. Kontrollera ryggskivan efter skador och byt ut vid behov, rengör även ryggskivan med fuktad trasa. Kontrollera halktape samt ersätt vid skador.

Vid rekonditionering rengörs hela sängryggstödet med dammsugare och fuktad trasa. Kontrollera funktionen för höjning och sänkning samt ryggskivan och halktapens status, byt ut vid behov.

Tillverkas av Sterners Specialfabrik. Stationsvägen 12 786 72 Dala-Järna.